

KATETER ÇIKIŞ YERİ BAKIMI



Masa temizlenir.



Kateter çıkış yeri bakımı için malzemeler hazırlanır.
1. Maske 2. Steril gazlı bez
3. Antiseptik solüsyon
4. Povidon iyot 5. Flaster



Maske takılır.



Eller antibakteriyel sıvı sabun ile 2 dk süresince hijyenik kurallara uygun olarak yıkanır.




Kirli pansuman dikkatli bir şekilde çıkarılır.



Ellere antiseptik solüsyon dökülür ve kuruması beklenir.



Kateter etrafında ve tünel boyunca ağrı, akıntı, şişlik olup olmadığına bakılır. Kabuklanma varsa fiziksel güç kullanılarak çıkarılmaz.

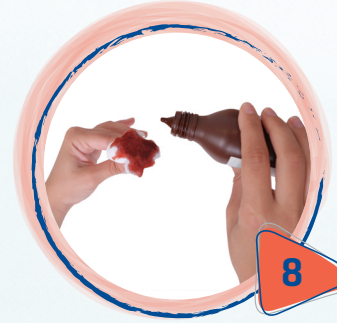

Steril gazlı bez paketi dikkatli bir şekilde açılır ve gazlı beze povidon iyot dökülür.



Povidon iyot dökülmüş gazlı bez ile kateter çıkış yeri merkezden dışarı doğru dairesel hareketlerle silinir ve gazlı bez atılır.

NOT:

Bu işlem her yeni steril gazlı bez ile 3 kere tekrarlanır.



Kuru steril gazlı bez ile kateter çıkış yeri kapatılır.



Kateter çıkış yerine koyulmuş olan kuru steril gazlı bez flaster ile sabitlenir.

NOT:

Kateter çıkış yeri kapatılırken kateterin doğal pozisyonu bozulmadan hareket edilmeli ve sabitlenmelidir.



Tüm belirti ve bulgular kayıt edilir.

DİKKAT! Kateter çıkış yerinin temiz tutulması önemlidir.

Sağlığınız bizim için değerlidir.

Baxter

www.adimadimdiyaliz.com



Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş. Sarıyer, İstanbul/TÜRKİYE
Telefon: +90 212 365 53 00
E-posta: tr_bilgi@baxter.com